

VERZOEK DE PATIËNT OM DE ORGINELE SOMNODENTDOOS + INHOUD MEE TE NEMEN EN STUUR DEZE MEE!

WAT IS ER AAN DE HAND?	IS ER VOORBEREIDING NODIG?	MEESTUREN
<b>BREUK/SCHEUR</b>	Geen	MRA, Gipsmodellen, Opdrachtbon
<b>ERNSTIGE BRUXIST</b> Aanbrengen van catwalk en/of vin versteviging	Geen	MRA, Gipsmodellen, Opdrachtbon
<b>ELASTISCHE RETENTIE</b> Plaatsen van knopklammers tbv aanbrengen van elastieken	Geen	MRA, Gipsmodellen, Opdrachtbon
<b>ADEMRUIMTE</b> Aanbrengen van ademsleuf in het front	Geen	MRA, Gipsmodellen, Opdrachtbon
<b>RESET MRA</b> (maximaal uitgedraaide schroeven)	MRA in de mond plaatsen, Futar occlusaal op onder- MRA aanbrengen. Voorzichtig dicht laten bijten totdat er contact gemaakt wordt. Let hierbij op eventuele verschuiving van de mediaanlijn. Probeer MRA in zijn geheel met Futar uit de mond te halen.	MRA met Futar, Gipsmodellen, Opdrachtbon
<b>PREMATUUR CONTACT OF SCHEVE BEETRELATIE</b>	Zie handelingen "Reset MRA". ↑ Indien Futar tussen onder- en boven-MRA niet mogelijk is dan graag een nieuwe Gauge nemen.	MRA, Gipsmodellen, Opdrachtbon (Nieuwe Gauge)
<b>KAAKKLACHTEN</b>	Controleren: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mediaanlijn? Klopt deze? Let op afwijking in MRA!</li> <li>- Pasvorm? Sluit de MRA goed over de gehele tandboog?</li> <li>- Prematuur contact? Evt. wegslijpen.</li> <li>- Staat de onderkaak te ver in protrusie?</li> </ul> Overleg met het lab.	Overleg met het lab
<b>RELINING</b> Bij slijtage of retentieverlies (Vervangen van gehele binnenlaag)	Nieuwe afdruk boven-en/of onderkaak	MRA, Nieuwe afdruk(ken), Oude Gauge, Opdrachtbon
<b>RELINING</b> Bij verandering van dentitie (Aanpassen of vervangen van gehele binnenlaag)	Nieuwe afdruk boven- en/of onderkaak en nieuwe Gauge-registratie (dit i.v.m. eventueel verhoogde occlusale vlakken)	MRA, Opdrachtbon, Nieuwe afdruk(ken) + nieuwe Gauge Oude gipsmodellen + oude Gauge
<b>VIN AFGEBROKEN: FLEX</b> Vin nog aanwezig	Geen	MRA, Gipsmodellen, Opdrachtbon
<b>VIN AFGEBROKEN: FLEX</b> Vin niet aanwezig	MRA in de mond plaatsen, Futar occlusaal op onder MRA aanbrengen. Voorzichtig dicht laten bijten totdat er contact gemaakt wordt.	MRA met Futar, oude gipsmodellen, oude Gauge, Opdrachtbon
<b>VIN AFGEBROKEN: FUSION</b> Metalen vin volledig afgebroken	Let hierbij op eventuele verschuiving van de mediaanlijn! Probeer het MRA in zijn geheel met Futar uit de mond te halen.	MRA met Futar, Gipsmodellen, Opdrachtbon
<b>VIN AFGEBROKEN: FUSION</b> Metalen vin nog intact	Vin zowel links als rechts vervangen door L1 en R1. MRA-bovenkaak 10 slagen deactiveren (tegen richting van pijl in). Evt. nieuwe vleugels nr. 0 bestellen.	Niets
<b>STELSCHROEF AFGEBROKEN (BOVENKAAK)</b> Met uitgedraaide schroef >30 slagen	MRA in de mond plaatsen, Futar occlusaal op onder MRA aanbrengen. Voorzichtig dicht laten bijten totdat er contact gemaakt wordt. Let hierbij op eventuele verschuiving van de mediaanlijn! Probeer het MRA in zijn geheel met Futar uit de mond te halen.	MRA met Futar, Gipsmodellen, Opdrachtbon
<b>STELSCHROEF AFGEBROKEN (BOVENKAAK)</b> Geen uitgedraaide schroef	Geen	MRA, Gipsmodellen, Opdrachtbon