

Somnodent Duplicaat proces




U start de procedure met de boven prothese van de patiënt.



U gaat putty modellen maken van de prothese van de patiënt. gebruik voldoende putty.



Putty en activator bij elkaar voegen.

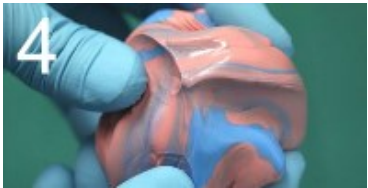

Putty en activator goed mengen.



Putty goed in de prothese drukken. Neem de randen goed mee.



Geheel op ondergrond plaatsen. Prothese iets in de putty drukken.



Uitharden.



Het nu verkregen putty model (na uitharding) insmeren met vaseline ten behoeve van separatie.




Vaseline goed verspreiden maar niet te dik.




De binnenzijde van de prothese is klaar. Nu gaan we verder met de buitenzijde. Weer voldoende putty aanmaken.




Gebruik een gedeelte van de putty om een ring rond de tandenrij te leggen.

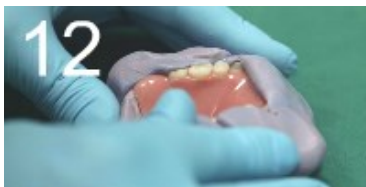

Putty goed aandrukken.

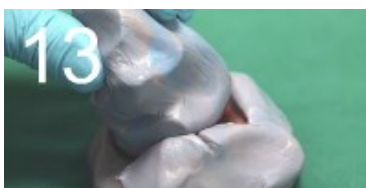

De bovenzijde goed dicht en aandrukken op het prothese oppervlak inclusief alle randen. Naarmate u beter aandrukt krijgt u een meer gedetailleerde putty afdruk.

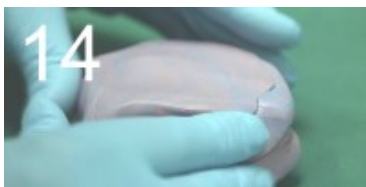

Alle openingen dicht en goed aandrukken.



Uitharden.




Voorzichtig de twee delen los halen. De twee delen laten los als u de vaseline goed gebruikt hebt.



Volledig loshalen.



Prothese uit de putty verwijderen.

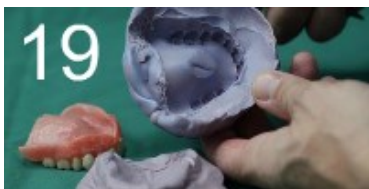

De twee putty modellen opsturen naar Goedegebuure. (patiënt krijgt de prothese terug)



Goedegebuure bewerkt de putty modellen en maakt een gietvorm om de duplicaat prothese te gieten.



De **duplicaat prothese**. Deze prothese word naar u geretouneerd. U maakt hiermee een reline afdruk en voert de George Gauge registratie uit in de tweede zitting. U maakt ook nog een alginaatafdruk van de onderprothese. Dit zijn voldoende gegevens voor Goedegebuure om een SomnoDent Edent te maken.